



hup DES FORTE M

Produktname hup DES FORTE M
Produktbereich Desinfektion



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektionstücher für alle alkoholbeständigen Flächen. Sehr gute Material- und Hautverträglichkeit. VAH/ÖGHMP gelistet. Parfümfrei. Zum raschen Desinfizieren auch während des Arbeitsprozesses z.B. in Küchen, Fitnessstudios, Pflegeheimen, Arztpraxen.

Verpackungseinheit

100 Tücher / Packung Art.-Nr. 4450304542

Anwendung | Einsatzgebiet

Biozidverordnung: Gebrauchsfertige Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von alkoholunempfindlichen Oberflächen.

EU-Medizinprodukteverordnung: Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten durch fachlich geschultes Personal.

Anwendung: Fläche mit hup DES FORTE gründlich abwischen und einwirken lassen. Dabei auf vollständige Benetzung achten und die Oberfläche über die gesamte Zeit feucht halten. Es ist sicherzustellen, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt wurden.


UDI-DI

00: UDI-DI 09008353219842

55: UDI-DI 09008353219910

Wirkspektrum

Flächendesinfektion mit Mechanik: bakterizid, levurozid	VAH/ÖGHMP; EN 13624, EN 13727, EN 16615	1 Min. *
Begrenzt viruzid	EN 14476	1 Min. *
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	3 Min. **
Adenovirus	EN 14476	3 Min. **
Norovirus	EN 14476	1 Min. **
Rotavirus	EN 14476	30 Sek. **
Mykobakterizid	EN 14348	1 Min. **

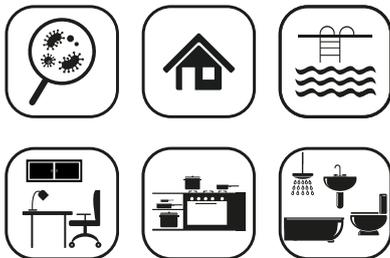



hup DES FORTE M

Begrenzt viruzid	EN 16777	1 Min. *
Begrenzt viruzid PLUS	EN 16777	5 Min. **
Bakterizid/levurozid	EN 1276, EN 1650, EN 13697	1 Min. *

* Hohe Belastung, medizinischer Bereich. ** Niedrige Belastung, medizinischer Bereich.

Alle Prüfungen bei Raumtemperatur.

Materialverträglichkeit

Eine Anwendung der Lösung auf Plexiglas (PMMA) ist nicht empfehlenswert.

Größe

H x B: 20 x 20 cm

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets

Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur optisch einwandfreie Ware verwenden.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen kühl und trocken lagern.

Produktempfehlung

Ideal geeignet für die Verwendung mit dem XIBU 2WIPE hybrid - dem weltweit ersten automatischen Spender für Feuchttücher. Der patentierte Spender schützt die Tücher vor Austrocknung und Verkeimung. Für alkoholempfindliche Oberflächen empfehlen wir hup DES PLUS.

BAuA Reg.-Nr.

N-96376

Verkaufseinheit

Packung

Europalette

270 Packungen

Rev. No. 03 / 11.07.2025